

BAMBACH SATTELSITZ

Montageanleitung – Anbringen einer Armlehne (links oder rechts*)



Eine Armlehne zu montieren ist ein rundum einfacher Vorgang. Indem Sie dies selbst tun, sind Sie in der Lage, die für Sie optimale Höhe und Positionierung der Lehne hinsichtlich Ihrer normalen Sitzposition zu finden, so dass Sie bequem und gut gestützt sitzen.

1. Entfernen Sie die Sitzfläche und Aufnahmevorrichtung von der Höhenverstellung.

- Drehen Sie den Sitz um und sorgen Sie für einen sicheren Stand.
- Setzen Sie das Spezialwerkzeug parallel zum Stoßdämpfer an, so dass es auf der Aufnahmevorrichtung liegt (Abb. 1 und 2).
- Das Spezialwerkzeug ermöglicht es Ihnen, die Sitzfläche zu entfernen, ohne den Sitz zu beschädigen.
- Schlagen Sie solange mit einem Hammer fest auf das Ende des Spezialwerkzeugs bis sich die Sitzfläche vom Stoßdämpfer löst (Abb. 3 und 4).
- Wenn Ihr Bambach Sitz bereits älter ist, wird die Sitzfläche fest mit dem Stoßdämpfer verbunden sein, so dass es einiger fester Schläge bedürfen kann.



2. Platzieren Sie den Abstandhalter auf der Höhenverstellung etwa 13 cm unter der Spitze der Stange und fixieren Sie ihn mit einem Inbusschlüssel.

- Stellen Sie sicher, dass der Abstandhalter mindestens 13 cm unter der Spitze des Stoßdämpfers sitzt (Abb. 5).
- Stellen Sie außerdem sicher, dass der Abstandhalter nicht mehr als 5 cm vom unteren Ende des Stoßdämpfers entfernt ist, um die Beweglichkeit der Höhenverstellung zu erhalten – wie weit unten Sie den Abstandhalter an der Höhenverstellung anbringen hat direkten Einfluß auf die Justierbarkeit, die Sie mit der Sitzhöhe erlangen können.
- Die beste Art, die passende Höhe des Abstandhalters zu ermitteln ist es, den Stuhl auf die Höhe zu bringen, die Sie normalerweise zum Sitzen nutzen und die Höhe des Abstandhalters dann so zu wählen, dass eine für Sie bequeme und stützende Höhe eingestellt ist. Die Höhe der Armlehne läßt sich mit Hilfe des Knopfes an der Seite der Lehne ebenfalls einstellen.

3. Setzen Sie den Befestigungsarm auf den Stoßdämpfer (Abb. 7 und 8).

4. Montieren Sie die Armlehne am Befestigungsarm und stellen Sie sie mit Hilfe der der Armlehnen-Höhenverstellung (2) auf die gewünschte Höhe ein und fixieren Sie sie.

5. Setzen Sie die Sitzfläche wieder auf den Stoßdämpfer.

6. Anschließend können Sie die restlichen Einstellungen mit Hilfe des Umschalthebels (1) vornehmen und die bequemste Position / den bequemsten Winkel einstellen.

