


C02-X

LED-Lichthärtungsgerät mit direktem Lichtkopf


- **4 Aushärtungsmodi:** Turbo, Voll, Ramp & Soft Cure
- **zwei Wellenlängen:** 390–480 nm – härtet alle Arten von Kompositen aus
- **Um 360° drehbarer Lichtleiter:** für optimalen Zugang in alle Bereiche
- **voreingestellte Aushärtungszeiten:** schnelle, effiziente und intuitive Bedienung
- **glattes, hygienisches Design:** leicht zu reinigen und verringert das Kontaminationsrisiko
- **Intelligente Ladestation:** induktives Laden mit integriertem Belichtungsmesser
- **Erhältlich in 7 leuchtenden Farben:** Rosa, Helllavendel, Blau, Hellblau, Hellgrün, Weiß und Schwarz
- **24 Monate Garantie:** für Ihre Sicherheit

LIEFERUMFANG:

- C02-X-Lichthärtungshandstück mit Ladestation
- **C02-X-1** 10-mm-Direktlichtkopf
- **C02-X-LH** Handstück-Unterteil mit Akku
- **C02-2** Lichtschutzblende
- **C02-3** autoklavierbare Hitzeschutzringe (6 Stück/Packung)
- USB-Typ-C-Kabel & EU-Stecker
- **125** Einweg-Schutzhüllen (100 Stück/Schachtel)

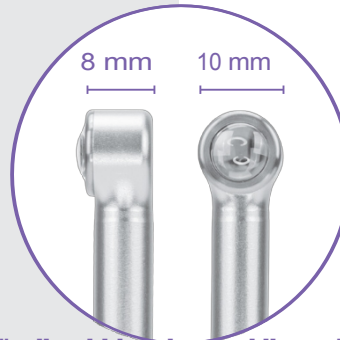


Für die okklusalen und lingualen Flächen optimierter Bestrahlungswinkel

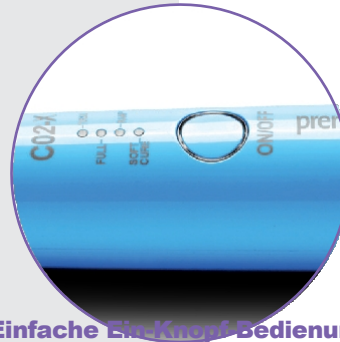

Einfache Ein-Knopf-Bedienung



Induktives Laden

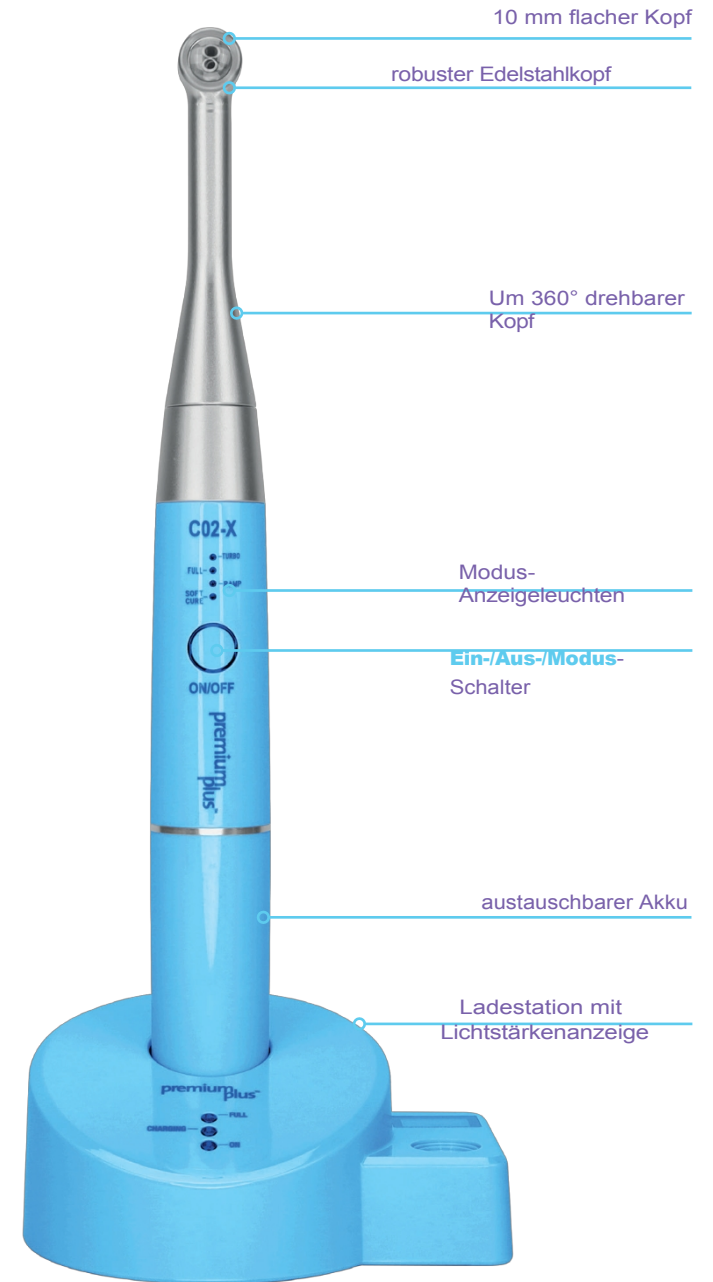

10 mm flacher Kopf

robuster Edelstahlkopf

Um 360° drehbarer Kopf

Modus-Anzeigeteuchten

Ein-/Aus-/Modus-Schalter

austauschbarer Akku

Ladestation mit Lichtstärkenanzeige




zwei Wellenlängen
**390 ~ 430 nm &
440 ~ 480 nm**

Lichtintensität bis zu
2500 mW/cm²

Gewicht
139 g

4 Modi

BETRIEBSMODI	ANWENDUNG	TECHNISCHE DATEN
TURBO	Extrem schnelle Aushärtung für Kunststoffe und Komposite mit einer Schichtdicke von maximal 2 mm. Auch empfohlen für Keramikbrackets, das Verkleben von Veneers usw.	2.500 mW/cm² für 3 Sekunden ±10 %
FULL	Für allgemeine Anwendungen.	1.200 mW/cm² für 10 Sekunden ±10 %
RAMP	Die ersten 0–5 Sekunden werden für allgemeine Anwendungen hochgefahren.	20 Sekunden: 0–5 Sekunden von 0 auf 1.200 mW/cm² ±10 % 5–20 Sekunden: 1.200 mW/cm² ±10 %
SOFT CURE	Die ersten 0–5 Sekunden erfolgen mit einer ansteigenden Leistung für eine schonendere Behandlung, speziell für Patienten mit Hitzeempfindlichkeit.	20 Sekunden: 0–5 Sekunden von 0–900 mW/cm² ±10 % 5–20 Sekunden 900 mW/cm² ±10 %

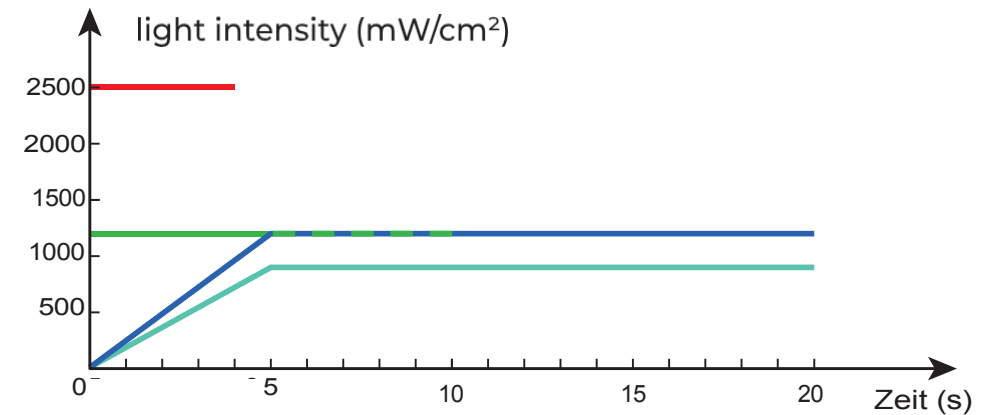

7 Farben

