


Endo-Express und SafeSiders

Versuchen Sie,
dieses Instrument
zu brechen!

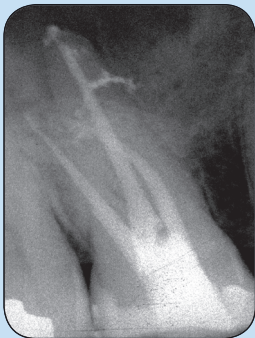

Die Vorteile auf einen Blick

Das System	Sicheres, ermüdungsfreies Aufbereiten des Wurzelkanals innerhalb von 2 – 5 Minuten.
Die alternierende Bewegung	Gleichmäßige Belastung der Instrumente, zentrierte Positionierung im Kanal. Die 45°-Bewegung verhindert: <ul style="list-style-type: none">• zyklische Ermüdung• Torsionsbelastung• Verbiegen des Instrumentes
Die Instrumente	SafeSiders haben nur 16 Schneiden, verglichen mit 24 Schneiden bei herkömmlichen Feilen. Dies bedeutet geringeren Widerstand, weniger Instrumentenverwindungen und Sicherheit vor Instrumentenbrüchen.
Die flache Seite der SafeSiders	Lässt Raum für Dentinspäne, die andernfalls zu Verblockungen führen und die Aufbereitung erschweren. Kanalverlagerungen werden vermieden.
Der Zeitvorteil	Einfache, schnell erlernbare Technik. Kosten pro Anwendung sind signifikant niedriger als bei rotierenden NiTi-Instrumenten. SafeSiders können mindestens dreimal häufiger verwendet werden als NiTi-Instrumente. Dank der maschinell-alternierenden Bewegung wird die Behandlungszeit reduziert.




Endo-Express & SafeSiders

Das **Endo-Express® System mit SafeSiders®** nimmt die Angst vor Instrumentenbrüchen, die mit Crown-down Systemen und den typischen Schwächen der Step-Back-Techniken verbunden wird. **SafeSiders®** sind die einzigen Instrumente mit einer patentierten Abflachung entlang des Arbeitsteils.


Diese Abflachung:

- verkürzt die Behandlungszeit durch schnelleren Vortrieb und geringeren Widerstand
- schafft Platz für Debris, das die Schneiden herkömmlicher Instrumente verstopft
- reduziert die Druck- und Torsionsbelastung während der Behandlung und erhöht somit die Haltbarkeit der Instrumente
- ermöglicht höhere Instrumentenflexibilität ohne Verlust an Stabilität
- reduziert die Angst vor Instrumentenbrüchen

Debris- Ablagerungen auf der flachen Instrumentenoberfläche

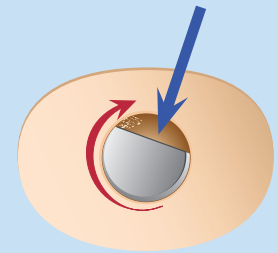

Querschnitt der SafeSiders

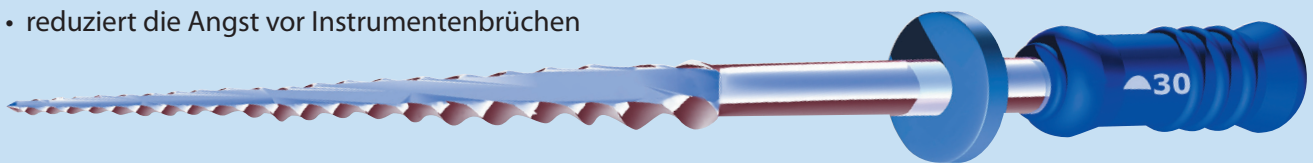

Mit konventionellen Reamern und Feilen können Kanäle verblockt und Debris über den Apex hinaus transportiert werden. Die 45°-Bewegung des **Endo-Express®** vermeidet dies. Sie verhindert Instrumentenverdrehungen, weil Dentin nur bei Bewegung im Uhrzeigersinn abgetragen wird. Die Bewegung gegen den Uhrzeigersinn löst das Instrument vom Dentin.



Endo-Express Winkelstück

Bestellinformationen

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis
Endo-Express® System (Länge: 21 mm)	<ul style="list-style-type: none"> • Endo-Express® Winkelstück • SafeSider® Einführungsset (Länge: 21 mm) • 4 Refill-Packs mit je 6 Instrumenten ISO-Größen: 08, 10, 15 und 20 • SafeSiders® Premium Guttapercha • Endo-Organizer 	5600-21	849,90 €
Endo-Express® System (Länge: 25 mm)	siehe 5600-21, jedoch Länge: 25 mm	5600-25	849,90 €
Endo-Express® Winkelstück	Endo-Express® Winkelstück, oszillierend	5500-00	499,00 €
SafeSiders® Einführungssets	Jedes SafeSiders® Einführungsset enthält: <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl: 2 x 08, 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20, 2 x 25, 2 x 30, 2 x 35, 2 x 40 • Nickel-Titan: 2 x 30/.04, 2 x 25/.06, 2 x 25/.08 • 2 x No. 2 Pleezer • Steri-Ständer 		
	21 mm Reamer Einführungsset	5021-00	219,90 €
	25 mm Reamer Einführungsset	5025-00	219,90 €
SafeSiders® Endo Stops	300 Endo Stops (jeweils 50 in 6 Größen). <ul style="list-style-type: none"> • Größen: 0,5 mm (schwarz), 1 mm (weiß), 2 mm (gelb), 3 mm (rot), 4 mm (blau), 5 mm (schwarz). Alle Stops mit 3,3 mm Durchmesser.	5000-06	59,90 €



LOSER & CO

öfter mal was Gutes...



LOSER & CO GMBH
 VERTRIEB VON DENTALPRODUKTEN
 BENZSTRASSE 1c, D-51381 LEVERKUSEN
 TEL.: +49 (0) 21 71 / 70 66 70
 FAX: +49 (0) 21 71 / 70 66 66
 web: www.loser.de • e-mail: info@loser.de

Die Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und sind gültig bis 31.12.2012. Irrtum und Preisänderungen vorbehalten.