

EASY BLOCK



Vertrieb Deutschland

Am Flugplatz 11 - 78579 Neuhausen ob Eck
Telefon: 07467 - 94919-10
Telefax: 07467 910211
E-Mail: info@schanz-medizintechnik.de
www.moehrle-dental.eu
www.schanz-medizintechnik.de




Laser Tech von Giorgio Lusuardi

Via Torino, 24/11 • 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) • Italien Tel.
+39 02 9240040
info@lasertechwire.it www.lasertechwire.it

Zum Patent
angemeldet

EASY BLOCK

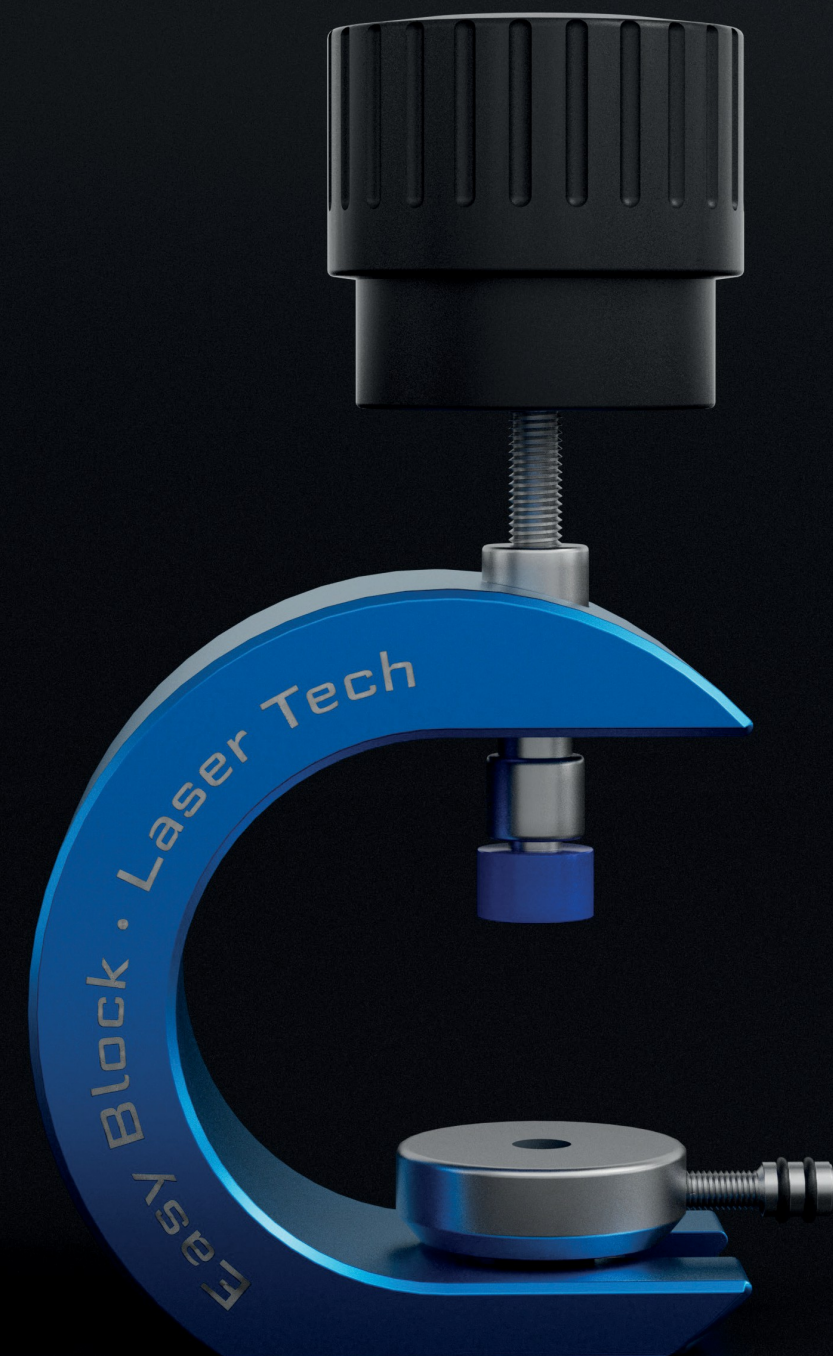



Easy Block ist ein neuartiges System, das es ermöglicht, Kronen auf T-Basen unter Verwendung der Anlagscheibe oder direkt unter Verwendung des Modells als Stütze zu zementieren.

Bei der Verwendung von **Easy Block** wird die Krone während der Aushärtungsphase des Zements durch den Drehmomentschlüssel mit konstantem Druck in Position gehalten.

Verdrehungen zwischen Krone und Tbase während des vom Drehmomentschlüssel erzeugten Drucks werden dank der am Klemmarm vorhandenen Rutschkupplung verhindert.

DEMO-SHORTS

<https://youtube.com/shorts/Tszh4lAthtc>

<https://youtube.com/shorts/Ai74qanSADY>

<https://youtube.com/shorts/u-CJEtWS4nk>


Vorteile:

- AUSHÄRTUNG DES ZEMENTS UNTER DRUCK
- PERFEKT ANLIEGENDE RANDVERSCHLÜSSE ZWISCHEN KRONE UND BASIS
- 100 % REDUZIERUNG DER HÖHENABWEICHUNGEN WÄHREND DER LICHTHÄRTUNG DES ZEMENTS
- VOLLSTÄNDIGE VERMEIDUNG VON ZEMENTABLÖSUNGEN AUFGRUND EINER FALSCHEN POSITIONIERUNG ZWISCHEN KRONE UND BASIS
- DIE ZEMENTIERUNGEN WERDEN SICHERER, WAS IN ALLEN PHASEN ERHEBLICHE VORTEILE BIETET.




Patent
angemeldet


Alle Preise zzgl. MwSt. und Porto

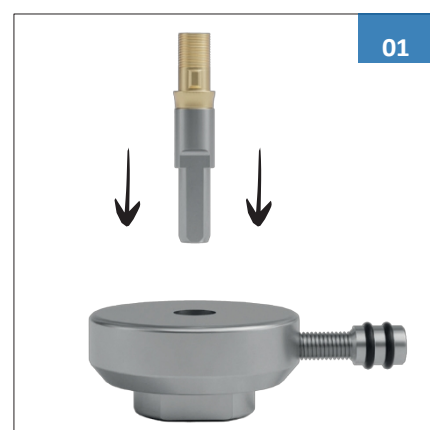

Setzen Sie die T-Base mit dem Analogteil in die dafür vorgesehene Scheibe ein und ziehen Sie sie mit der Feststellschraube fest.

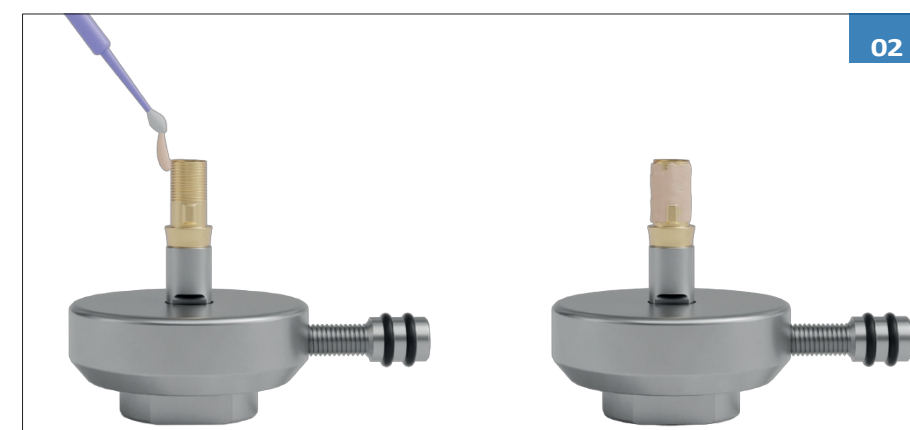

Nach dem Auftragen des Primers den Zement auf die Tbase auftragen.

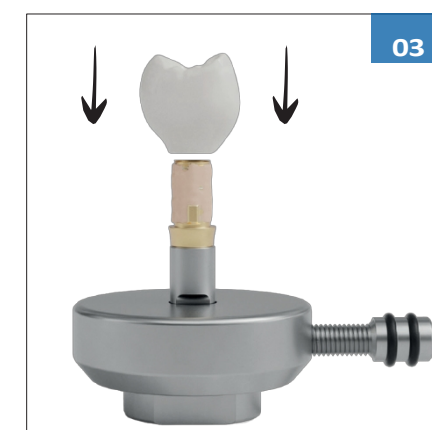


Setzen Sie die Krone auf die Tbase und setzen Sie die Scheibe in den Easy-Block-Bogen ein.



Beginnen Sie mit dem Anziehen der Schrauben unter Verwendung des Drehmomentschlüssels.



Das „Klicken“ erfolgt schrittweise und kontrolliert, bis die endgültige Anzugsfestigkeit erreicht ist.

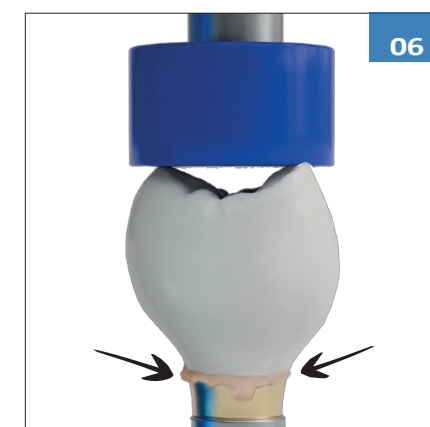

Sobald die Krone unter Druck steht, entfernen Sie überschüssigen Zement.



Warten Sie die erforderliche Zeit ab, bis die Aushärtung vollständig abgeschlossen ist.