

C01-X

LED- Lichthärtungsgerät mit Glasfaser-Lichtleiter


- **4 Aushärtungsmodi:** Turbo, Voll, Ramp & Soft Cure
- **Zwei Wellenlängen:** 390–480 nm – härtet alle Arten von Kompositen aus
- **Um 360° drehbarer Lichtleiter:** für optimalen Zugang in alle Bereiche
- **Voreingestellte Aushärtungszeiten:** schnelle, effiziente und intuitive Bedienung
- **Schlichtes, hygienisches Design:** leicht zu reinigen und verringert das Kontaminationsrisiko
- **Intelligente Ladestation:** induktives Laden mit integriertem Belichtungsmesser
- **Erhältlich in 7 leuchtenden Farben:** Pink, Hell-Lavendel, Blau, Hellblau, Hellgrün, Weiß und Schwarz
- **24 Monate Garantie:** für Ihre Sicherheit

LIEFERUMFANG:


- C01-X-Lichthärtungshandstück mit Ladestation
- **C01-X-1** 11-mm-Glasfaser-Lichtleiter
- **C01/2-X-LH** Handstück-Unterteil mit Akku
- **C01-2** Schutzblende
- USB-Typ-C-Kabel & EU-Stecker
- **123M** Einweg-Schutzhüllen (100 Stück/Packung)




11-mm-Lichtleiter aus
Glasfaser

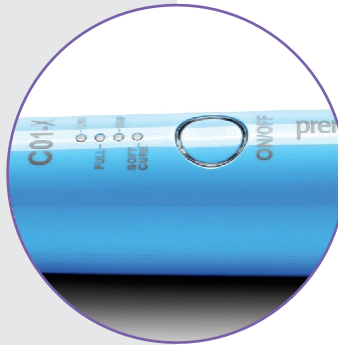

Einfache Ein-Knopf-
Bedienung

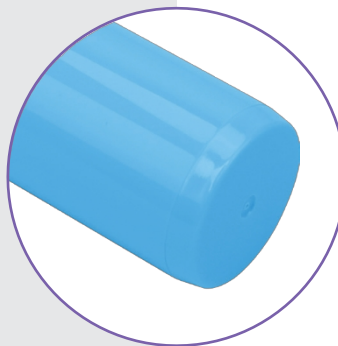

Induktives Laden

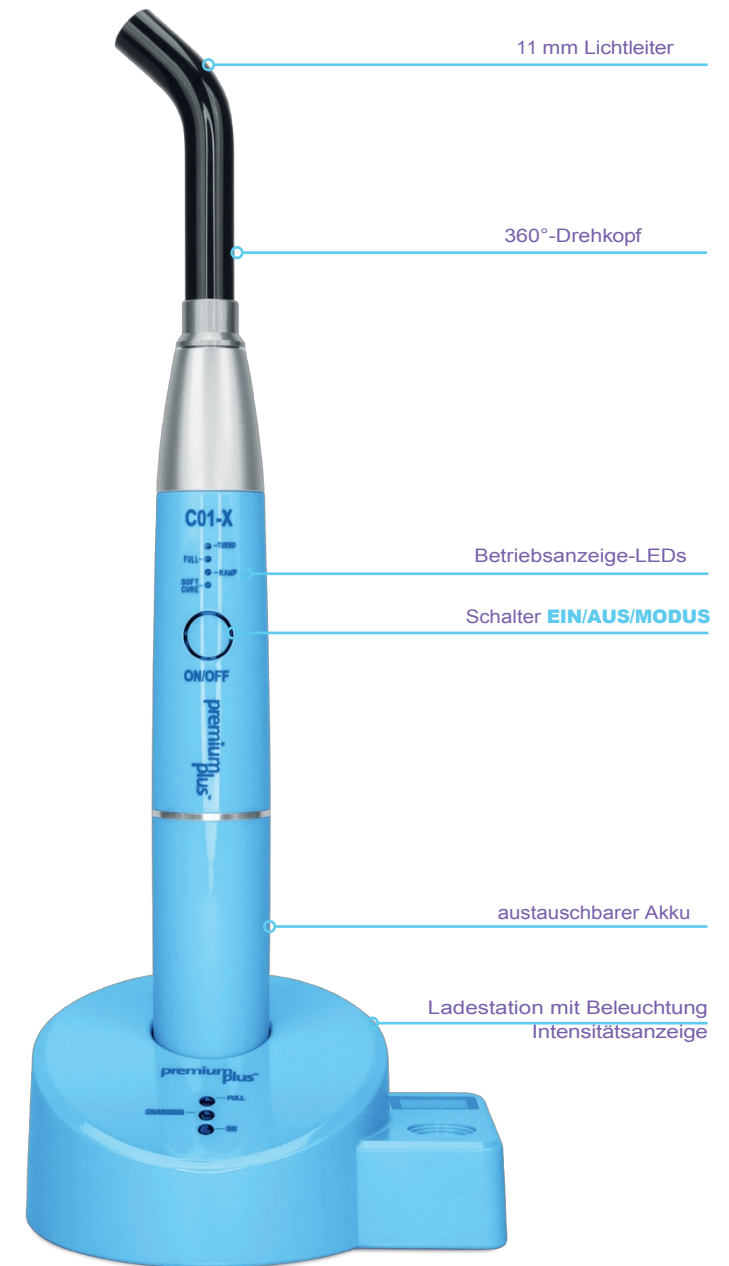




zwei
Wellenlängen
390 ~ 430 nm
440 bis 480 nm

Lichtintensität bis zu
2000 mW/cm²

Gewicht
173 g

4 Modi

BETRIEBSARTEN	ANWENDUNG	TECHNISCHE DATEN
TURBO	Extrem schnelle Aushärtung von Kunststoff und Komposit mit einer Schichtdicke von maximal 2 mm. Auch empfohlen für Keramikbrackets, das Verkleben von Veneers usw.	2.000 mW/cm² für 4 Sekunden ±10 %
FULL	Für allgemeine Anwendungen.	1.200 mW/cm² für 10 Sekunden ±10 %
RAMP	Die ersten 0–5 Sekunden werden für allgemeine Anwendungen hochgefahren.	20 Sekunden: 0–5 Sekunden von 0–1.200 mW/cm² ±10 % 5–20 Sekunden 1.200 mW/cm² ±10 %
SOFT CURE	Die ersten 0–5 Sekunden erfolgen mit einer ansteigenden Leistung für eine schonendere Behandlung, speziell für wärmeempfindliche Patienten.	20 Sekunden: 0–5 Sekunden von 0–900 mW/cm² ±10 % 5–20 Sekunden 900 mW/cm² ±10 %

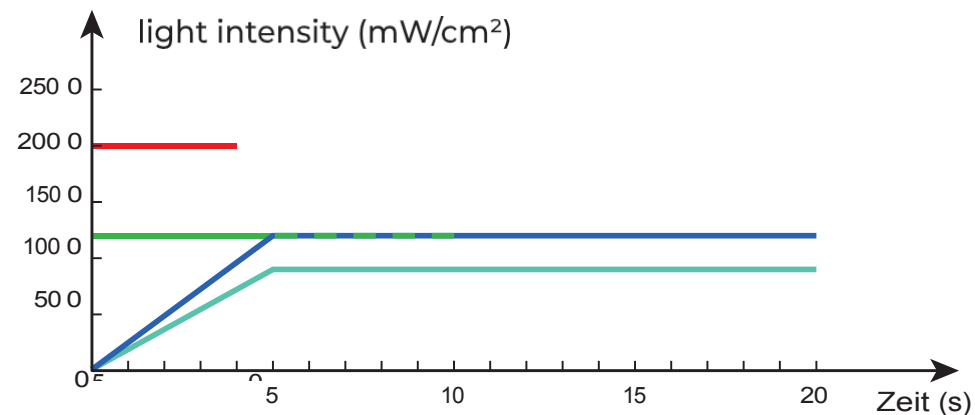

7 Farben

